

Handicare

950 / 1000 / 1100



Handicare cuenta con una amplia red comercial de vendedores cualificados en toda España. Piensalo: siempre podrás encontrar tu distribuidor local.

El distribuidor local más cercano:



📍 Handicare Stairlifts B.V.
Newtonstraat 35
1704 SB Heehugowaard
Los Países Bajos

✉️ stairlifts@handicare.com

🌐 www.handicare-salvaescaleras.es

PÁGINA 4
**ESTAMOS CONTENTOS DE
PODERER QUEDARNOS EN CASA**

“Gracias a nuestro salvaescaleras podemos vivir de forma independiente y a gusto en nuestro hogar”

PÁGINA 17
TECNOLOGÍA PUNTA

“¡Una imagen inmediata de nuestro futuro salvaescaleras en nuestro hogar!”

Índice

Handicare: 130 años de experiencia	6
Salvaescaleras rectos de Handicare	8
Ventajas del salvaescaleras	12
Soluciones a medida	17
La instalación: fácil y rápida	24
Preguntas frecuentes	26
Handicare: sinónimo de calidad	27



“Gracias a nuestro salvaescaleras, no necesitamos mudarnos para sentirnos seguros y cómodos en nuestro hogar”.



4 **“Podemos quedarnos en nuestro propio hogar”**



6 **130 años de experiencia en la elevación**



12 **Ventajas del salvaescaleras**



23 **“Nuestro asesor de Handicare es de la zona”**



24 **La instalación: fácil y rápida**

“¡Podemos quedarnos en nuestro propio hogar!”

Nuestro dormitorio está en el primer piso, y los últimos años notaba que me costaba cada vez más subir las escaleras. Después de hablar con mi marido decidimos que era el momento de hacer algo. Gracias a uno de nuestros amigos empezamos a pensar en un salvaescaleras. Aunque no estaba segura de si habría una solución para las escaleras empinadas de nuestra casa.



“Gracias al salvaescaleras, me mantengo activa y puedo hacer mis actividades diarias de forma segura”.

Comenzamos a buscar y después de ponernos en contacto con un agente certificado de Handicare, todo fue muy rápido. Vino un consultor para evaluar nuestra escalera y nuestra situación, para así podernos asesorar y mostrarnos las diversas opciones que teníamos.

Días más tarde, me convertí en la orgullosa propietaria de un salvaescaleras debidamente instalado y listo para usar. Desde ese día no hemos tenido ningún problema para subir o

bajar nuestras escaleras empinadas. Ahora puedo subir fácilmente para coger un suéter o mis gafas para leer.

Estamos especialmente contentos porque teníamos miedo de tener que trasladar nuestro dormitorio y nuestro baño a la planta baja. O, incluso, tener que mudarnos de casa. Estamos muy a gusto en nuestra casa y disfrutamos de nuestro hermoso jardín, ¡así que estamos muy contentos de haber encontrado una mejor solución!

Handicare: 130 años de experiencia en la elevación



Handicare: innovaciones en la elevación

Los orígenes de nuestra empresa se remontan al 1886, cuando nuestro fundador creó una "empresa técnica comercial". Aunque han cambiado muchas cosas en 130 años, la innovación siempre ha estado en nuestro ADN. Hemos sido vanguardistas en la fabricación de salvaescaleras más seguros, más fáciles de usar y que representan la mejor opción. Desde el primer salvaescaleras que instalamos en 1961 hasta el día de hoy, continuamos avanzando a grandes pasos para servir a nuestros clientes de la mejor manera posible.

No solo se ha mejorado la seguridad y comodidad del usuario, sino que el diseño del salvaescaleras también ha experimentado importantes avances. Actualmente puede elegir entre varios estilos, tapicería y colores de riel: ¡existe un salvaescaleras adecuado a cualquier gusto y decoración!

Somos conscientes de que todos quieren personalizar el salvaescaleras según sus necesidades individuales. Es más, cada hogar es único. Por lo tanto, nuestros salvaescaleras se hacen especialmente a medida para usted. Gracias a nuestra innovadora herramienta PhotoSurvey, su asesor de Handicare puede medir de forma eficiente y precisa su escalera, así como generar una imagen en tres dimensiones del salvaescaleras para que pueda ver exactamente cómo quedará instalado en su hogar. Posteriormente, puede hablar con el asesor sobre cómo configurar la solución perfecta antes de que se envíe para su fabricación.

Nuestra presencia internacional, con oficinas en el Reino Unido, los Países Bajos, Alemania, Francia, Italia, Noruega, Dinamarca, China, Estados Unidos y Canadá, hace que Handicare sea una marca conocida por su calidad, innovación y servicio.

A día de hoy podemos contar más de **700.000** clientes satisfechos en todo el mundo.

● Empezamos como primeros fabricantes de ascensores en Países Bajos.



● Se instaló nuestro primer salvaescaleras.



1886

1900

1961

1967

2018

Hoy



Después de 4 años, ya habíamos instalado más de 600 ascensores.

● Instalamos uno de los primeros salvaescaleras curvos.



● Nuestra apuesta por la innovación continúa con el desarrollo del salvaescaleras Handicare 1100

Un salvaescaleras recto de Handicare

Handicare tiene una solución para todas las situaciones y escaleras.

Todos nuestros salvaescaleras son silenciosos, seguros y fáciles de utilizar. No importa qué tipo de escalera tenga, nuestros salvaescaleras compactos y personalizados pueden instalarse en cualquier lugar. Incluso las escaleras más estrechas tienen suficiente espacio para poder subir y bajar a pie después de instalar el salvaescaleras.

La alta calidad en todos los aspectos convierte al salvaescaleras de Handicare en un recurso valioso para su independencia. Le permite seguir viviendo en su propio hogar, sin los riesgos relacionados con las escaleras. Un salvaescaleras le permite moverse libremente y le da tranquilidad. Es una experiencia que muchos de nuestros satisfechos clientes experimentan cada día.



COMODIDAD

Todos nuestros salvaescaleras están equipados con un asiento cómodo, un apoyabrazos y un cinturón de seguridad.

FÁCIL DE UTILIZAR

El salvaescaleras se maneja fácilmente con una palanca de mando ergonómica e intuitiva.

PERSONALIZADO


Cada riel del salvaescaleras está diseñado y fabricado específicamente para que se adecúe a su escalera, garantizando así que esté perfectamente ajustado y que se maximiza el espacio para el resto de usuarios de la escalera.






COMPACTO Y PLEGABLE

Pliegue el salvaescaleras cuando no lo use para optimizar el espacio en los pasillos o vestíbulos.

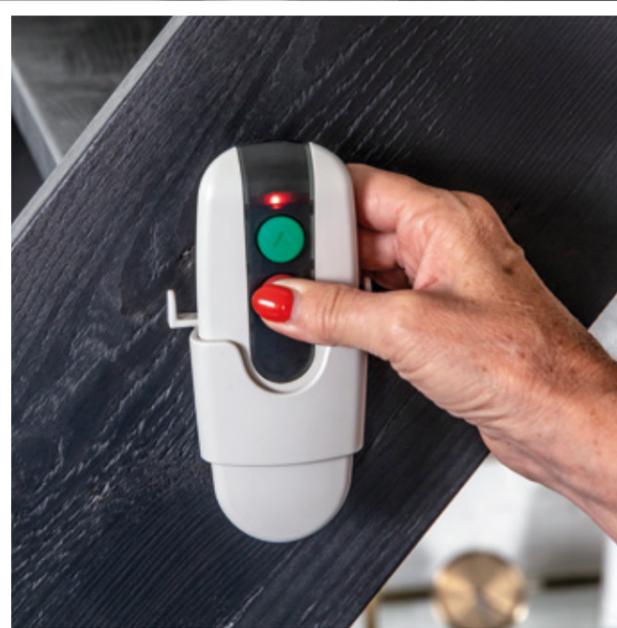

MANDO A DISTANCIA

El salvaescaleras viene de serie con dos mandos a distancia, uno para arriba y otro para abajo. De este modo, podrá enviar o llamar el salvaescaleras tan solo pulsando un botón.

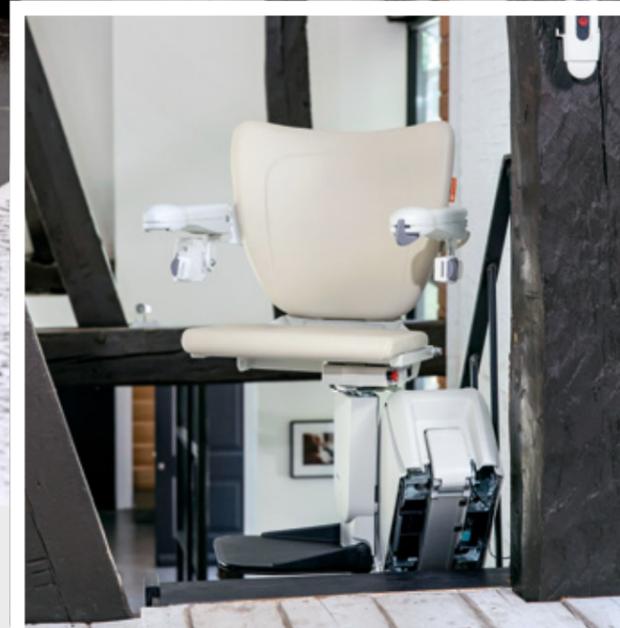

GIRO AUTOMÁTICO

Gire la silla hacia el rellano manteniendo la palanca de diseño ergonómico orientada al rellano. Eso permite que bajarse del salvaescaleras sea fácil y seguro.



SEGURIDAD ANTE TODO

El reposapiés automático opcional le permite plegar y desplegar el reposapiés sin tener que agacharse. Seguridad y comodidad garantizada.

Las ventajas de su salvaescaleras

Gracias a sus numerosas características, un salvaescaleras recto de Handicare será un valioso complemento en su hogar.



Sensores de seguridad

El salvaescaleras está equipado con varios sensores de seguridad que detendrán el salvaescaleras cuando se encuentre con un obstáculo.

Riel plegable

Para garantizar que el riel no obstruya el pasillo Handicare ofrece un riel plegable. El riel se puede plegar de forma manual o automática.




Silla giratoria

La silla puede girarse hacia el rellano para poder bajar del salvaescaleras con mayor facilidad y seguridad. Esto se puede hacer de forma manual o automática.



Riel deslizante

En la serie 950, Handicare ofrece un Riel deslizante. Eso permite que, cuando sea necesario, el riel se mueva simultáneamente con la silla para despejar el acceso a una puerta en el rellano inferior de la escalera.

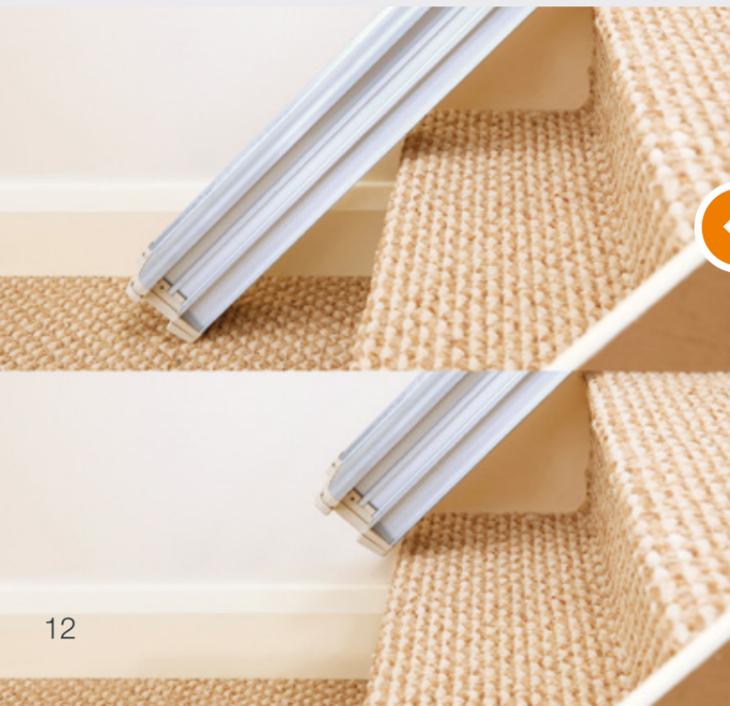

Reposapiés de plegado automático

Para incrementar la comodidad y seguridad puede instalarse la opción del reposapiés de plegado automático. Esta opción le permite plegar y desplegar el reposapiés sin tener que agacharse.





La más amplia gama de salvaescaleras disponible



Handicare 1100

La última incorporación a la gama de salvaescaleras rectos de Handicare es el 1100. Este modelo de salvaescaleras es especialmente interesante por la esbeltez y suavidad de su riel.

El Handicare 1100 es ultra delgado y compacto y puede montarse cerca de la pared, dejando así mucho espacio libre en la escalera para que el resto de usuarios suban y bajen las escaleras de forma segura.

La función giratoria de la silla viene de serie y le garantizará que podrá subir y bajar del salvaescaleras de forma segura.



Riel revolucionario

El 1100 tiene el riel de salvaescaleras recto más delgado del mercado, lo que garantiza que el salvaescaleras no sea intrusivo. Los cuatro rodillos de accionamiento y el sistema de riel de fricción, en lugar de una cremallera tradicional, hacen que el Handicare 1100 sea silencioso, suave y fácil de mantener.

Por último, la función de carga continua estándar garantiza que las baterías estén siempre cargadas, independientemente del lugar en que estaciona el salvaescaleras.



Handicare 1000

Con su riel de aluminio anodizado, el Handicare 1000 ofrece una solución elegante con una cremallera oculta. Para este modelo hay seis colores de tapicería disponibles y puede equiparse con giro automático y un reposapiés de plegado automático.

Este fino riel de aluminio tiene dos puntos de estacionamiento para cargar las baterías en la parte superior e inferior de las escaleras. El riel puede equiparse con una bisagra plegable para garantizar que no obstruye la parte inferior de las escaleras.

Handicare 1000 XL/XXL

Con una capacidad de 160 kg y 200 kg, respectivamente, el Handicare 1000 XL y XXL son nuestros modelos más potentes.



Handicare 950+

Para aquellos usuarios que desean opciones automáticas, el 950+ es la solución ideal. Al combinar el riel de carga continua del 950 con nuestra silla Smart, el 950+ le permite elegir entre seis colores para el tapizado de la silla. El 950+ ofrece la posibilidad de elegir entre opciones manuales y automáticas para el giro de la silla y el reposapiés.

Handicare 950

Si no necesita las opciones eléctricas, el 950 es la solución más sencilla y asequible. El reposapiés y la silla giratoria pueden operarse manualmente. El 950, al igual que todos los salvaescaleras de nuestra gama de productos, está equipado con un cinturón de seguridad.


Las características de la serie 950

Los rieles de nuestros salvaescaleras 950 están equipados con la función de carga continua. Eso significa que puede estacionar el salvaescaleras en cualquier lugar cuando no esté en uso, sin correr el riesgo de que se agoten las baterías. La serie 950 es compatible con nuestro Riel deslizante y también está disponible con un riel plegable manual o automático. De este modo se evita el posible riesgo de que el riel constituya un obstáculo (por ejemplo, a causa de una puerta).



Su salvaescaleras personalizado


Handicare Vision es una aplicación que utiliza el asesor para mostrarle el aspecto del salvaescaleras en sus escaleras, incluyendo las diversas opciones de estilo.

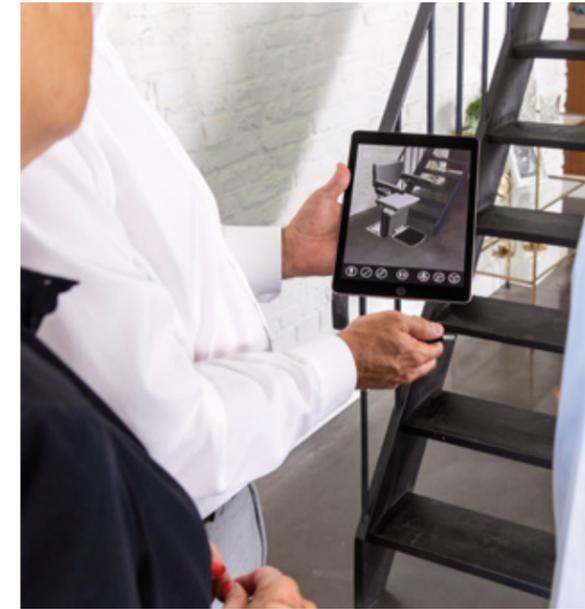

Usamos PhotoSurvey para medir con precisión las escaleras. Con estas mediciones podemos mostrarle una imagen en tres dimensiones del salvaescaleras en su escalera. Puede configurar el salvaescaleras con su asesor para asegurarse de que se siente cómodo con el diseño antes de que se vaya.



Cuando esté satisfecho con la solución propuesta, comenzará la producción del salvaescaleras en una de las fábricas de Handicare. En Handicare, diseñamos, desarrollamos y fabricamos con orgullo nuestras soluciones de salvaescaleras.

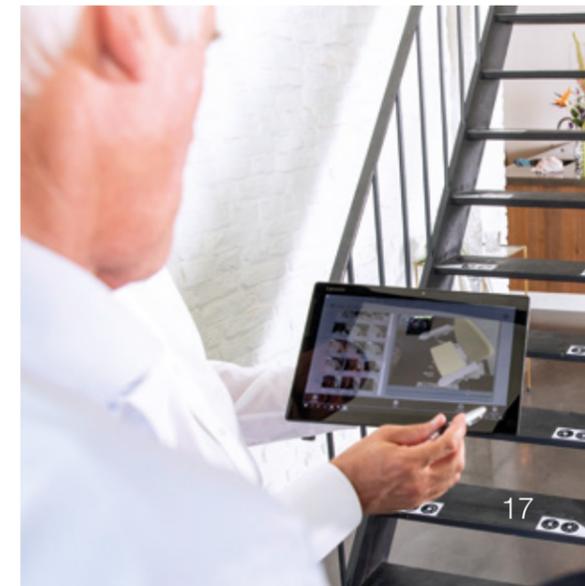

Un salvaescaleras para cada interior

Sin duda, es importante que su salvaescaleras se adecúe al resto de la decoración de su hogar. Por eso le ofrecemos la posibilidad de elegir entre cuatro estilos de sillas y con diferentes tipos de tapicería.



Silla Style
(HANDICARE 1100)



BEIGE
VAINILLA

Silla Smart
(HANDICARE 1000 / 950+)




Silla Simplicity
(HANDICARE 950)



ARENA



Silla Smart Perch
(HANDICARE 1000/950+)

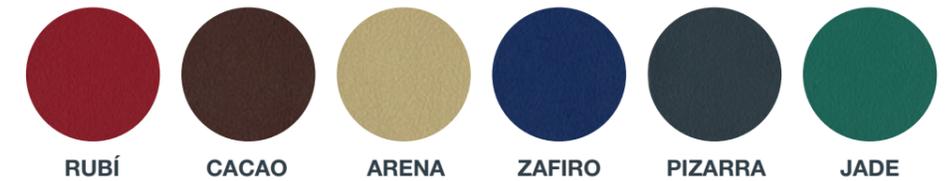

Si tiene una escalera estrecha o problemas con su rodilla o cadera y no puede sentarse, la silla Smart Perch es la opción perfecta para usted. El asiento elevado y la profundidad reducida de la silla le permiten utilizar el salvaescaleras de pie mientras está sujeto de forma segura mediante un cinturón de seguridad.



Cómo usar el salvaescaleras

PASO 1

Baje el apoyabrazos, la silla y el reposapiés y siéntese en el salvaescaleras. El reposapiés eléctrico opcional le permite desplegar el reposapiés automáticamente.



PASO 2

Abroche el cinturón de seguridad.



PASO 3

Cuando se sienta cómodo y seguro utilice la palanca para operar el salvaescaleras.




PASO 4

Cuando llegue arriba puede usar las manivelas o la función de giro automático para girar la silla hacia el rellano superior y, así, bajar del salvaescaleras fácilmente.



PASO 5

Como último paso, simplemente desabroche el cinturón de seguridad y baje al rellano.

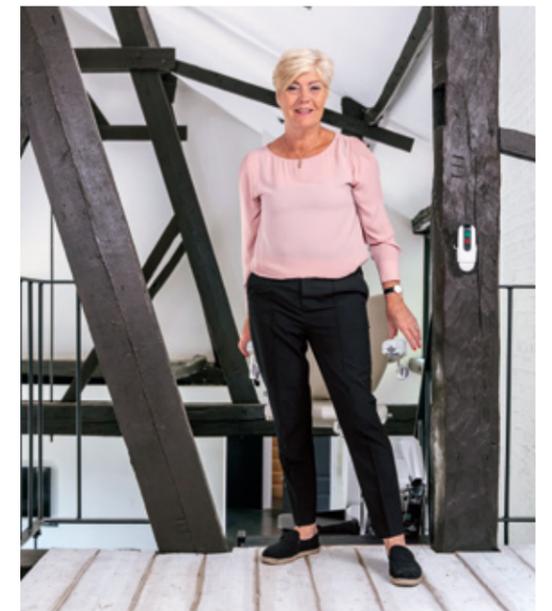

“Es tan fácil de usar, ¡ahora puedo subir cómodamente!”





“Hemos elegido un agente certificado regional de Handicare.”

Desde hace un tiempo a mi mujer le cuesta subir las escaleras. Al principio no quería reconocerlo, pero después de varios incidentes hablamos sobre la situación y tomamos una decisión: teníamos que resolver este problema antes de que la situación se volviera demasiado peligrosa.

Comenzamos a buscar información en Internet y comparamos las diferentes soluciones y ofertas del mercado. Con sus 130 años

de experiencia y su amplia gama de productos, Handicare destacó por encima de los demás y elegimos a un agente certificado de Handicare cerca de nuestro hogar.

Un asesor experimentado visitó nuestro hogar para evaluar nuestra situación y la escalera. Durante esta visita nos aconsejó sobre la mejor solución disponible. Apenas un día después, el salvaescaleras estaba listo para ser instalado en nuestro hogar.

“Reconforta saber que podemos confiar en un agente certificado local de Handicare en caso de que necesitemos algún tipo de apoyo o servicio. También es un alivio para nuestros hijos que no viven cerca”.





La instalación

Cuando elige Handicare tiene la seguridad de que gestionamos todo el proceso, desde el diseño y el desarrollo hasta la producción de su salvaescaleras. Eso nos permite fabricar el mejor salvaescaleras a medida para usted, antes de que llegue a su puerta y sea instalado por un técnico certificado de Handicare.



1

Concierte una cita cuando más le convenga. Nuestro técnico experto puede instalar su salvaescaleras en solo unas horas.

2

Primero se instala el riel del salvaescaleras, que se monta en las escaleras y no en la pared. Después del riel, el técnico instalará la unidad y, a continuación, la silla, lo que significa que el salvaescaleras está casi listo para su uso.



3

Una vez que el salvaescaleras esté instalado, el técnico se tomará el tiempo necesario para explicarle cómo utilizar el salvaescaleras. No se irá hasta que esté 100 % cómodo y satisfecho.

Preguntas frecuentes

Procuramos que nuestros clientes estén 100 % satisfechos. Por ese motivo, hacemos un esfuerzo adicional para ofrecerle los más altos estándares de servicio y responder a sus preguntas de la mejor manera posible.

Hemos incluido algunas de las preguntas más frecuentes de nuestros clientes. Si tiene más preguntas, póngase en contacto con su representante o asesor certificado local de Handicare para una consulta gratuita y sin compromiso.

¿SE PUEDE INSTALAR UN SALVAESCALERAS EN MI ESCALERA?

Handicare ofrece una amplia gama de salvaescaleras para escaleras rectas y curvas. Gracias a una gran variedad de modelos de salvaescaleras podemos ofrecer una solución adecuada para cada situación, independientemente de si las escaleras son estrechas, empinadas, curvas o largas. Handicare siempre tiene una solución adecuada para su escalera.

¿SE TIENEN QUE HACER GRANDES REFORMAS PARA INSTALAR UN SALVAESCALERAS EN MI HOGAR?

¡No! Un salvaescaleras de Handicare puede instalarse en tan solo unas horas. Dado que se monta en la escalera, no tiene que preocuparse por posibles renovaciones o perforaciones en su pared.

¿QUÉ PASA CON EL SALVAESCALERAS SI HAY UN CORTE DE LUZ?

Un fallo eléctrico no es motivo de preocupación. Su salvaescaleras de Handicare utilizará las baterías para seguir funcionando y puede utilizarse durante al menos 10 viajes hacia arriba y abajo de las escaleras.

¿EL SALVAESCALERAS HARÁ JUEGO CON MI DECORACIÓN?

Haremos todo lo posible para encontrar la combinación perfecta entre el salvaescaleras y su decoración. Handicare le ofrece la posibilidad de elegir entre diferentes sillas y colores de tapicería que han sido seleccionados para que combinen con la mayoría de los colores de interiores.

¿CUÁL ES EL PRECIO DE UN SALVAESCALERAS?

Puesto que cada salvaescaleras está personalizado, el precio varía en función de la configuración del salvaescaleras. Sin embargo, ofrecemos una serie de soluciones adaptadas a su presupuesto.

Calidad garantizada



Ofrecemos todos nuestros productos con una garantía completa. Un salvaescaleras de Handicare es sinónimo de alta calidad: calidad en términos de seguridad, innovación, comodidad y diseño. Garantizamos que todos nuestros productos cumplen con los máximos estándares en términos de calidad y seguridad.

Handicare se enorgullece de contar con el certificado de calidad ISO 9001: 2015. Además, todos nuestros productos han sido probados y aprobados por entes de inspección independientes de ámbito mundial, como TNO y Liftinstituut.

